


TImask SUISSE Sagl

ISTRUZIONE D'USO

Semi Maschera Facciale:

- **Dispositivo di Protezione Individuale tipo FFP2 NR**
- **N° Certificazione: EPT 0477.PPE.21/4489**

Art. - TIME

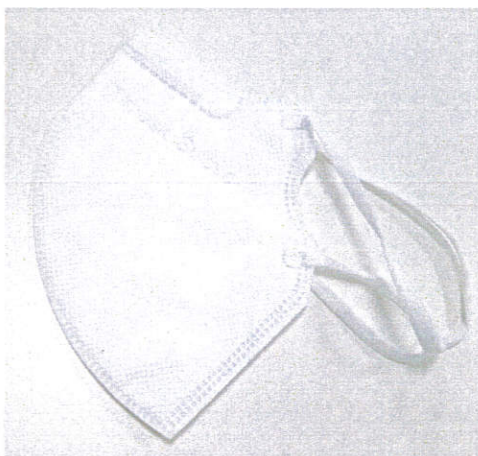

Prodotto: MONOUSO NR (Non Riutilizzabile)

Busta Confezioni: Una bustina contiene 5 pz.

Scatola: Una scatola contiene 4 bustine da 5 pz. Per un totale di 20 pz.

NON STERILE (prodotto in condizione igienico sanitaria idonea)

DESTINAZIONE D'USO: Utilizzabile dalla popolazione e in ambienti di lavoro

Ligornetto, 14 Giugno 2021

Il Legale Rappresentante, Moreno Lazzaroni

ISTRUZIONI D'USO

Riferimenti Normativi

- Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
- EN 149:2001 + A1:2009

Campo d'applicazione

La semi maschera di protezione per le vie respiratorie ha lo scopo di fornire protezione alle vie respiratorie da Aerosol/Droplets solidi e liquidi (in accordo alla norma EN 149:2001+A1:2009). TIME FFP2 NR fornisce una prestazione filtrante 99.04%.

Per indossare correttamente la Semi Maschera Facciale

- Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato per la vita o la salute e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza;
- Lavarsi le mani;
- Togliere la semi maschera facciale dal suo imballo solo prima dell'utilizzo;
- Prima di indossare il dispositivo assicurarsi di aver riconosciuto correttamente la fronte dal retro dello stesso e che lo stesso risulti ben aderente alla superficie del volto
- Prima di ogni utilizzo della semi maschera facciale, verificarne l'integrità, la data limite d'utilizzo (riportata sotto la scatola) e che la classe di protezione sia adeguata all'utilizzo (in base al prodotto utilizzato e alla concentrazione);
- Tenere la semi maschera facciale preformata nel palmo della mano, con il ponte nasale verso l'alto e gli elastici di regolazione pendenti.
- Posizionare la semi maschera facciale sotto al mento, coprire la bocca e il naso.
- Posizionare i lacci dietro alle orecchie in modo da avere totale aderenza sul viso (se necessario accorciare i lacci facendo un nodo).
- Premere con le due mani la barretta nasale intorno al naso per garantire una perfetta aderenza.
- Controllare la tenuta ermetica espirando forte e verificare che sul perimetro del respiratore non ci sia nessuna perdita d'aria.
- Riaggiustare se necessario e ricontrollare
- Mentre si indossa la semi maschera facciale evitare di toccare la semi maschera facciale con le mani e se proprio necessario, effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la semi maschera facciale;

Per togliere correttamente la Semi Maschera

- Lavarsi le mani
- Sfilare i lacci da dietro le orecchie
- Portare avanti le mani e prendere la semi maschera
- Gettare la semi maschera facciale all'interno di un sacchetto di raccolta che deve essere smaltito evitando di toccare le semi maschere facciali all'interno.
- Lavarsi le mani

Limiti d'utilizzo

- Questa semi maschera facciale non può essere utilizzata per oltre un giorno lavorativo (NR = Non Riutilizzabile, la semimaschera filtrante antipolvere non deve essere utilizzata per più di un turno di lavoro)
- Questa semi maschera facciale può essere utilizzata una sola volta (nessuna manutenzione);
- Non utilizzare al di fuori del campo di utilizzo definito nel presente foglietto illustrativo.

AVVERTENZE

- Chi indossa questa semi maschera facciale deve aver previamente ricevuto adeguata formazione e aver preso visione del presente foglietto informativo;
- Utilizzare la semi maschera facciale in zone ben areate, con presenza di ossigeno (> 19.5%) e non in atmosfere esplosive.
- La semi maschera facciale deve essere perfettamente posizionata per garantire il livello di protezione previsto;
- Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono la perfetta aderenza della semi maschera facciale e lasciano la possibilità di perdite;
- Abbandonare immediatamente la zona a rischio se la respirazione diventa difficile e/o se si provano stordimenti o malessere;
- Non modificare in nessun modo questo dispositivo di protezione individuale e gettare se danneggiato in alcuna sua parte;
- Qualora, mentre si sta indossando la semi maschera facciale, si percepisca difficoltà a respirare, affanno, per cause esterne (ad esempio: aria satura di polvere) la mascherina andrà, immediatamente, sostituita.

Controindicazioni

- Il contatto con la pelle potrebbe provocare reazioni allergiche su soggetti particolarmente sensibili. In questo caso, lasciare la zona a rischio, togliere la semi maschera facciale e consultare un medico.
- Non usare se la respirazione diventa difficile e/o se si provano degli stordimenti o malesseri;
- Non sono conosciute reazioni allergiche ma, per persone sensibili manifestanti intolleranza dermica, abbandonare la zona a rischio, togliere la semi maschera facciale e consultare il medico;
- In caso di arrossamento, gonfiore e prurito dopo l'uso, interrompere l'utilizzo e consultare il proprio medico
- Il dispositivo risulta infiammabile – tenere lontano da fuoco e fiamme
- Il dispositivo deve essere conservato in una stanza asciutta e ventilata
- Il prodotto risponde alle normative sui dispositivi di protezione individuale e non a quelle sui dispositivi medici
- Nel caso in cui il DPI non dovesse presentarsi in maniera conforme (ad esempio: elastici rotti, ponte nasale che fuoriesce, ecc.) tale dispositivo dovrà essere scartato e sostituito con uno conforme.

Istruzioni per lo stoccaggio ed il trasporto

Quando non in uso, trasportare nella confezione originale

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua confezione originale (-10°C/+50°C - HR<80%).

Modalità di smaltimento

Smaltire secondo l'ordinaria categoria di raccolta differenziata come RSU

Conforme alla disposizione del regolamento.

Informazioni Supplementari

Il DPI è oggetto della procedura di valutazione sotto la sorveglianza dell'organismo notificato:

Eurofins Product Testing Italy S.r.l., via Cuorgnè 21, 10156, Torino (Italia) CE 0477

➤ **N° Certificazione: EPT 0477.PPE.21/4489**

La dichiarazione di conformità è disponibile al seguente indirizzo web:

www.timask.ch

TIme

FFP2 NR CE0477
EN 149:2001 - A1:2009

TImask Suisse

PRODOTTO DA TImask Suisse Sagl

Via Michele Roggia 2, 6853 Ligornetto, Svizzera CHE-229.952.023 IVA

Tel. +41 (0)91 647 17 17 mail commerciale@timask.ch